


 **STRICKER®**

ATEMSCHUTZMASKE  
**FFP2 NR**

**10**  
STÜCK

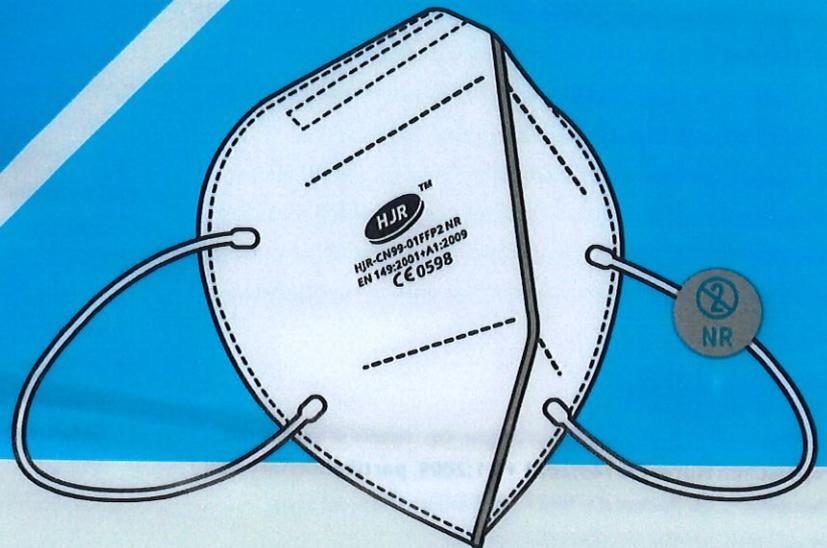

**CE 0598**

EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

WIR WOLLEN IHRE PROBLEME.

LÖSEN.



## ANLEITUNG

- » Anwendung nur mit sauberen Händen!
- » Maske aus der Verpackung nehmen, an den beiden Schlaufen festhalten und leicht auseinanderziehen.
- » Mund und Nase vollständig mit der Maske bedecken und Schlaufen hinter den Ohren fixieren.
- » Nasenbügel mit beiden Händen der Nasenform anpassen und stets auf einen ordnungsgemäßen Sitz der Maske achten, um die Schutzfunktion der Maske zu gewährleisten. Wenn die Maske nicht dicht anliegt, keine Gefahrenbereiche betreten.
- » Zum Ablegen der Maske die Schlaufen hinter den Ohren lösen.
- » Gebrauchte Maske von Gesicht und Kleidung fernhalten, um eine Berührung mit potenziell kontaminierten Oberflächen zu vermeiden.
- » Maske nach Gebrauch sofort in einem geschlossenen Behälter entsorgen.

## ZULASSUNG

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der neuen erweiterten europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009, partikelfiltrierende Halbmasken. Sie finden die Konformitätserklärung unter [www.stricker.ms/de/stricker/downloads](http://www.stricker.ms/de/stricker/downloads).

## LAGERUNG

Vor direktem Sonnenlicht und Kälte schützen. Die Luftfeuchtigkeit darf nicht mehr als 80 % betragen. Vor Kontakt mit Feuer, Regen, Säuren und Laugen schützen.

Chargennummer: 20201031  
Datum der Herstellung: 31.10.2020  
Ablaufdatum: 31.10.2023  
Made in China

Art.-Nr200099866

CE0598

EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



## SICHERHEITSHINWEISE

- » Der Benutzer muss mit dem Gebrauch und der Handhabung der Maske vertraut und geschult sein. Beachten Sie bei Anwendung nationale Regeln (DGUV-R 112-190) sowie alle mitgelieferten Informationen.
- » Vor jedem Betreten eines gefährdeten Bereichs ist darauf zu achten, dass die Maske eng am Gesicht anliegt. Bei größerem Atemwiderstand oder Kontamination der Maske muss diese sofort ausgetauscht werden. Die Maske ist ausschließlich für den einmaligen Gebrauch geeignet. Sie darf nicht ausgebeißert, gereinigt oder modifiziert werden.
- » Die Maske darf nur in einer Umgebung mit einem Sauerstoffgehalt von mindestens 19 % eingesetzt werden.
- » Kein Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen und Dämpfen.
- » Die Masken bieten dem Anwender Schutz vor festen und nicht flüchtigen flüssigen Partikeln.
- » Die Masken dürfen nicht getragen werden, wenn z. B. ein Bart oder andere Eigenschaften, die eine feste Abdichtung zwischen Gesicht und Dichtlinie verhindern, den korrekten Sitz der Maske beeinträchtigen.
- » Die Nichtbefolgung der Anweisungen zur Anwendung der Maske und/oder die Fehlbenutzung während eines Aufenthalts in einem Gefahrenbereich kann die Gesundheit des Anwenders beeinträchtigen und zu schweren Erkrankungen oder dauerhaften Schäden führen.
- » NR = Nicht wiederverwendbar



**Shenzhen HJR Electronics Technology Co., LTD.**  
5 / F Building A3 Xinjianxing Science and Technology Industrial Park, No. 3333, Guangqiao Avenue, Gongming Street, Guanming New District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



## KONTAKT

Stricker GmbH & Co. KG  
An der Kleimannbrücke 4  
48157 Münster